

## Инструкция по чипированию животных

- 1** До чипирования животного необходимо убедиться с помощью ручного считывателя в том, что животное не имеет чипа.
- 2** Как только определено место имплантации чипа, должна быть проведена визуальная проверка и пальпация с целью исключения патологических отклонений в здоровье, которые могут затруднить имплантацию чипа и последующее заживление участка кожи.
- 3** Необходимо считать номер чипа ридером, код должен совпадать с указанным на упаковке.
- 4** Перед установкой чипа необходимо продезинфицировать кожу в месте имплантации. Если животное обладает длинной шерстью или на шерсти есть грязь, можно сбрить или помыть шерсть перед чипированием.
- 5** Необходимо сделать так, чтобы животное оставалось неподвижным в момент введения чипа.
- 6** Каждая метка должна быть установлена с помощью шприца/иглы, рекомендованной производителем. Как только произошла имплантация чипа, нужно до конца нажать на аппликатор, чтобы не допустить выпадение метки после чипирования.
- 7** После имплантации, необходимо убедиться в отсутствии кровотечения. Для предотвращения воспаления раны и ускорения заживления, такие объекты как ошейники, не должны помещаться вблизи/на место имплантации чипа, до тех пор, пока рана не заживет окончательно.
- 8** После имплантации необходимо зарегистрировать номер чипа в соответствующей базе.

**+7 (495) 133-00-40**  
**[www.smart-card.ru](http://www.smart-card.ru)**

